

# 尿検査受付名簿について

以下のものを事前にお渡し致します。


- 1 尿採取容器(スポイト式)
- 2 尿採取容器入れ(緑色のビニール袋)
- 3 採尿用紙コップ
- 4 尿検査のお知らせ
- 5 クラス別回収袋
- 6 全体回収袋
- 7 バーコードラベル(氏名等印字済み)
- 8 受付名簿(氏名等印字済み)
- 9 検体お預かり証(予備回収時)

- 1 「検査受付名簿」と検体に貼る「ラベル」には予め「施設名」「クラス」「氏名」が印字されたものをお渡しいたします。  
ラベルは「スポイト式尿採取容器」の側面に貼って下さい。

No.	出席No.	お名前	性別	提出欄	No.	出席No.	お名前	性別	提出欄
1	1	大空 広海	男		26				
2	2	江東 太郎	男		27				
3	3	江東 真理子	女		28				
4	4	江東 百合子	女		29				
5		以下 余白			30				
6					31				
7					32				
8					33				
9					34				
10					35				
11					36				

受付名簿

ラベル

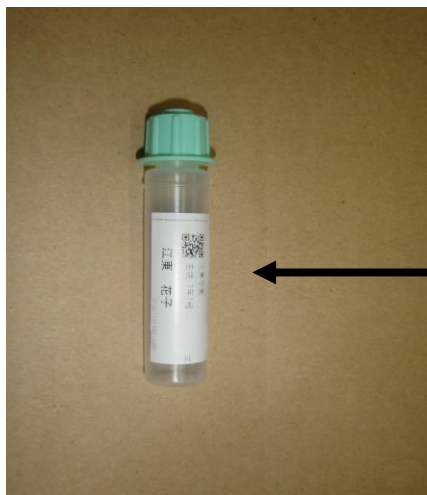

スポイト式尿採取容器

スポイト式尿採取容器にラベルを貼って下さい

- 2 「受付名簿」の「提出欄」には提出された方にレ点のチェックを入れて下さい。また「ご提出日」、「提出件数」をご記入頂き、検体(採尿容器)と一緒にご提出下さい。

※「受付名簿」の控えが必要な場合は、コピーをお願い致します。


# 尿採取の仕方

1. スポイト式の尿採取容器へラベルシールを貼付ください。



スポイト式尿採取容器

2. 採尿用の紙コップを折り尿を採取してください。尿採取容器はキャップを外し手をつまみ、尿を吸い取って下さい。

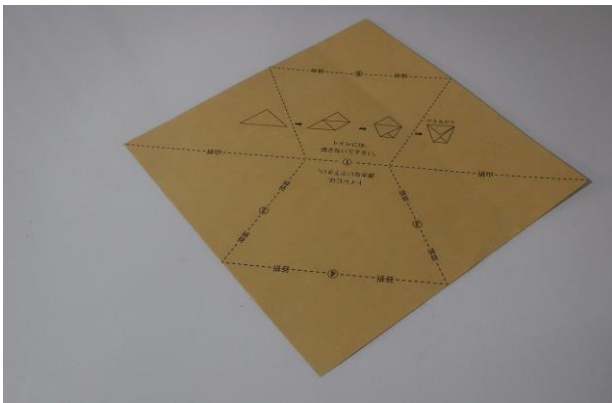

折り畳み式採尿用紙コップ

3. 尿採取容器の「ここまで入れる」という線のところまで尿を吸い取り、しっかりとキャップを閉めて下さい。



4. 尿採取容器で尿を吸い取ったら、緑色のビニル袋に入れてご提出下さい。



※尿採取容器に貼るラベルを紛失した場合は、白紙のラベルに「施設名・クラス・氏名」をご記入頂き、尿採取容器に貼りご提出下さい。  
また、余った資材等は回収当日に回収いたします。